

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Spilerdug og bestilling af spilerdug

Formål: Information om bestilling og vask af spilerdug.

Spilerdug er et forflytningshjælpemiddel. Kan også anvendes som hjælpemiddel til at få tøj, inkl. kompressionsstrømper på. Søg vejledning hos din forflytningsvejleder.

Spilerdugen er i sygeplejedepotet på Albertshøj.

Hvis du sammen med din forflytningsvejleder vurderer, at der skal anvendes spilerdug hos en beboer, skal der sendes en mail, til:

sof.depot.plejeboligomraadet@albertslund.dk

Husk at angive hvor langt det skal være.

Den fag- og udviklingsansvarlige sygeplejerske vil sørge for det bliver leveret til beboeren.

Spilerdugen må ikke anvendes af flere beboere.

Spilerdugen kan rengøres / aftørres med sprit 70 %. Hvilket bør gøres en gang om ugen, hvis der ikke er synlig forurening på.

Ved synlig forurening, skylles dette af under vandhanen, hvorefter aftørring med sprit 70 %.

Spilerdugen kan maskinvaskes på skåneprogram, med lav centrifugering på 60 gr.

Spilerdugen mister effekt ved hver vask, derfor må den vaskes 4 gange, herefter skal den smides ud.

For hver gang du maskin vasker spilerdugen, skal du klippe et lille stykke af et af hjørnerne, således, at når der er klippet i 4 hjørner, skal spilerdugen kasseres.

Efter vask i vaskemaskinen eller aftørring med sprit 70 % kan spilerdugen godt anvendes til en anden beboer.

Udsendt første gang:

16.04.2014

Revideret:

27.05.16

Denne udgave er lagt på

www.plejebolig.albertslund.dk
og gældende fra:

27.05.16

SB-SYS: Procedurer