

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rubens ballon

Henvender sig til: Sundhedsfagligt uddannet personalet i plejebolig området.

Formål: Viden om hvordan rubens ballon anvendes.

- Anvendes til beboere ved ophørt respiration.
- Ballonen der er selvekspanderende, fylder sig selv med luft, og ved tryk på ballonen blæses der luft ned i beboerens luftveje.
- Skal tilkobles O2, så snart Falck ankommer.

Ansvar:

Det er gruppelederne der er ansvarlige for at der findes en rubens ballon, at den er intakt og at få den udskiftet ved udløb.

Vær opmærksom på, at nogle er engangs, og skal kasseres efter brug. Hvis du har anvendt en engangs skal du informere din leder, der vil sørge for der bliver indkøbt en ny.

Placering:

- Humlehusene: I sygeplejedepotet.
- Albertshøj: I akutskabene ved vagtstuerne

Fremgangsmåde:

- Beboeren skal ligge på ryggen, således at luftvejene er frie.
- Tjek at der ikke er fremmedlegemer i beboerens mund / hals. Fjern evt. tandprotese.
- Den der skal ventilere skal stå bag beboerens hoved.
- Træk beboerens hoved bagover ved, at holde på panden med den ene hånd og træk hagen op med den anden hånd – således der skabes underbid. Dette for, at åbne beboerens luftveje.
- Dæk beboerens mund og næse med ventilationsmasken. Hold masken tæt til ansigtet i et greb med den ene hånds 4 første fingrer. Lillefingeren presser kæben op.
- Start med at ventilere beboeren ved rytmisk at pumpe ballonen med den anden hånd 15 gange – skal evt. gentages.
- Det er vigtigt at beboerens brystkasse hæver og sænker sig i forbindelse med ventilationen.

Rengøring:

Masken og ballonen aftørres i 70 % sprit. Hvis masken er meget forurenede skal den kasseres.

Udsendt første gang:

27.02.17

Revideret:

Denne udgave er lagt på
www.plejebolig.albertslund.dk
og gældende fra:

27.02.17

SB-SYS: Procedurer